

Após os ajustes, aperte o gatilho até o devido disparo. O porta pino solta o pino, que se fixa automaticamente na tarraxa a ser solta, perfurando o lóbulo da orelha. **Dica 2:** Neste momento, o cliente pode manifestar desejo de apalpar o local do furo, tocando o brinco, oriente-o a não fazê-lo.

Para remover o aparelho da orelha, solte o dedo do gatilho e mova cuidadosamente o aparelho para baixo, para desencaixar e soltar a tarraxa.

Repita a operação no outro lóbulo.

Orientações pós perfuração

Repita e explique as instruções já recebidas pelo cliente, a respeito das 4 primeiras semanas pós aplicação, de seguir as instruções contidas no rótulo da embalagem dos brincos, reforçando a sua importância e de que sua inobservância, poderá acarretar infecção no local da aplicação, ocasionando eventualmente inflamação, e em consequência, necessidade de consultar o médico.

A rara, porém possível ocorrência de alergia individual, reação do organismo a um corpo estranho, mesmo que hipalérgico, implicará na necessidade de retirar os brincos.

Componentes do Aparelho para Perfuração e Colocação de Brincos SteriClip

Compõe o estojo plástico:

(I) 2 aparelhos para perfuração e colocação de brincos - um aparelho de cor preta com 3 (tres) ogivas para alojar a cabeça do brinco, nos tres diâmetros existentes, para aplicação de brinco modelo grande (tamanho G, de grande), brincos modelo adulto (tamanho M, de médio) e modelo infantil (tamanho P, de pequeno);

(II) a. 3 ogivas para aplicação de brinco modelo grande (diâmetro maior, tamanho G, de grande), outra para brinco modelo adulto (diâmetro médio, tamanho M) e uma mais para aplicação de brincos tipo infantil (diâmetro menor, tamanho P);

(III) b. 1 distanciador plástico de ogivas

(IV) 2 kits de brincos, tipo adulto e infantil, para treinamento do profissional aplicador;

(V) Manual do Usuário-aplicador de brincos;

(VI) Bloco impresso com o Termo de Autorização para perfuração dos Lóbulos das Orelhas.;

(VII) 1 caneta com tinta a base de violeta genciana.

Cuidados com o Aparelho

Para manter o seu **Aparelho para Perfuração e Colocação de Brincos SteriClip** em boas condições de uso, observe o seguinte:

(I) Limpe as partes do aparelho, antes e depois de cada cliente atendido. Esse procedimento limpa e ao mesmo tempo esteriliza. O aparelho não necessita de lubrificação.

(II) Nunca mergulhe o aparelho em álcool, anti-sépticos e/ou outros, pois seu funcionamento será comprometido.

(III) Não utilizar autoclave para esterilização. O aparelho é feito em poliestireno de alto impacto injetado, e esse procedimento o deformará, comprometendo seu funcionamento.

(IV) Deixe o aparelho destravado, para conservar a pressão do mesmo;



Termo de Garantia e de Assistência Técnica

Este produto fabricado pela Perfur do Brasil Ltda. - EPP é produzido dentro do mais moderno Sistema de Qualidade. O processo de fabricação observa de forma rigorosa os princípios da Resolução RDC n.º 56 de 06/04/2001 e da RDC n.º 59 de 27/06/2000, ambas da ANVISA M.S., garantindo, assim, seu total e efetivo desempenho.

A garantia contra defeitos de fabricação do aparelho e das peças, é de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data da compra e condicionalmente renováveis, enquanto for utilizado com os brincos originais da empresa e com compras mínimas bimestrais realizadas, conforme o porte da empresa.

A garantia não cobre despesa de remessa. Constatado qualquer problema com o uso do aparelho, comunique a ocorrência à Empresa, para receber autorização para a remessa do aparelho defeituoso, para análise e consequente reparo ou substituição.

O mau uso, abusos físicos ou o uso deste produto para fins diversos daquele para o qual foi projetado e indicado, não estão cobertos por esta garantia.

A Perfur do Brasil Ltda. - EPP não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes da utilização indevida dos seus produtos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - S.A.C.

A Perfur do Brasil Ltda. - EPP, através de seu S.A.C. fornece respostas imediatas sobre qualquer produto da empresa. Para isso, basta acessar-nos pela Internet, via telefone ou fax para enviar sua sugestão, dúvida, reclamação, comunicação, orientação sobre o correto uso, e ou sugestão de melhoria, etc.

Av. Assis Chateaubriand, 833 - Taubaté - SP - CEP 12.091-800
CNPJ 50.018.340/0001-18 SAC: 90 (12) 3621 3299
www.perfur.com.br - e-mail: perfur@perfur.com.br



Específico para Aparelhos com Ogivas

Produto declarado ISENTO de registro pelo Ministério da Saúde
Cadastramento (ISENÇÃO) na ANVISA:
Brincos estéreis para perfurar o lóbulo das orelhas sob o n.º 10362449005 e
Aparelho para perfuração do lóbulo da orelha e aplicação de brincos sob n.º 10362449006

Manual do Usuário-aplicador de brincos.

1 - Aparelho

Ideal para fazer o primeiro furo dos lóbulos das orelhas de adultos ou crianças, com perfuração e aplicação dos Brincos SteriClip, projetados exclusivamente para serem aplicados pelo aparelho.

O Aparelho para Perfuração e Aplicação de Brincos SteriClip, é indicado para a perfuração dos lóbulos das orelhas, não devendo ser utilizado em outros lugares do corpo.

Pontos a salientar ao cliente, antes da aplicação

- Esclarecer que a perfuração dos lóbulos das orelhas é feita por pessoal habilitado e tecnicamente preparado, além de ser em local adequado, da Farmácia ou Drogaria, por possuir os meios necessários para completa higienização das mãos, aparelho e lóbulos das orelhas, visto que os brincos são esterilizados;

- O pessoal encarregado da aplicação deve conhecer e entender cada item das instruções pós perfuração, para melhor atender o cliente.

- Averiguar se o cliente não se enquadra no quadro abaixo, na categoria dos que tem que aguardar a melhora de seus lóbulos .

Havendo sinais de quistos, feridas, espinhas, acne, etc, perfurar somente quando os mesmos desapareçam ou com autorização por escrito do médico (documento será retido). Desaconselhamos totalmente, perfurar o lóbulo das orelhas de pessoas com diabetes, hemofilia e demais, com problemas de coagulação sanguínea e/ou cicatrização, como quando há predisposição genética na formação de quelóide, que é uma lesão tumoral, de superfície lisa e consistência endurecida.

- Logo após, proceder a leitura do Termo de Autorização para Perfuração, de Ciência e de Obrigação e das Instruções Padrão Pós Perfuração dos Lóbulos das Orelhas, sua devida compreensão, fornecendo explicações adicionais, caso sejam pedidas e colher sua assinatura, ou a do responsável, no caso de ser um menor.

- Constata-se melhor cumprimento das instruções, quando o menor assina conjuntamente, formalizando seu compromisso, independentemente de sua firma não possuir valor legal.

- Atentar no preenchimento do Termo, em relacionar cuidadosamente, o número do lote do brinco, sua data de vencimento e a data da perfuração do(s) lóbulo(s), além dos dados do cliente.

Os Passos prévios à perfuração:


- Detalhar antes da perfuração, o procedimento de aplicação e cuidados essenciais pós perfuração a serem tomados pelo adulto ou menor autorizado pelo responsável legal e permitir ao cliente, acompanhar visualmente a desinfecção do aparelho, das mãos e das orelhas (com ajuda de espelho);

- Durante e após o procedimento, realize a desinfecção do aparelho com cotonetes embebidos em solução anti-séptica ou álcool glutaraldeído, secando-o em seguida, dando atenção especial às partes que tocarão os brincos e os lóbulos;

- Lave bem as mãos com água e sabão e seque-as com toalha descartável, realize a desinfecção das mãos com álcool ou similar;

- Realize a desinfecção dos dois lados dos lóbulos das orelhas do cliente, com algodão embebido em solução anti-séptica ou álcool não mais tocando-os.

Aguarde a secagem, para marcar simetricamente com a caneta de tintura a base de violeta genciana, o local no lóbulo a ser perfurado, ou seja, os dois lados a mesma altura e distância do rosto e peça ao cliente que, com auxílio do espelho, sem tocá-lo, autorize o procedimento, evitando, assim, que o mesmo fique contrariado após a perfuração.

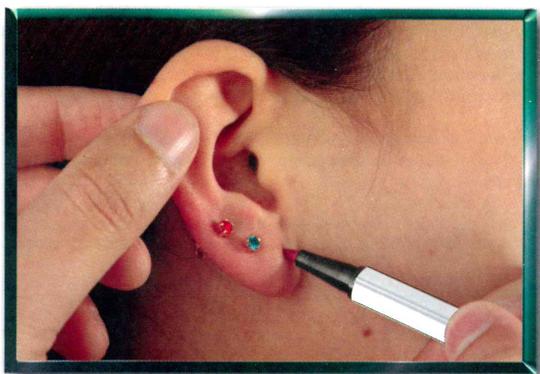

Caso haja diferença, limpe a marca e corrija a posição, até a sua satisfação. **Dica:** Faça um ponto pequeno, pois o grande sempre parece fora do centro.

Os Passos da perfuração

1. Após a escolha do modelo do brinco **SteriClip** pelo cliente, encaixe a ogiva correspondente ao modelo escolhido (grande, adulto ou infantil, respectivamente tamanho grande, médio ou pequeno) no aparelho. Os brincos modelo grande estarão embalados em suporte lilás claro (utilizar ogiva com diâmetro interno maior), os brincos modelo adulto estarão embalados em suporte branco (utilizar ogiva com diâmetro interno médio) e os brincos modelo infantil embalados em suporte rosa salmão (utilizar ogiva com diâmetro interno menor)




1.a. Abra a embalagem dos Brincos para Perfuração **SteriClip**, rompa a sua parte traseira e retire cuidadosamente o suporte plástico dos brincos sem tocá-los. A embalagem dos brincos só deverá ser rompida no momento da perfuração, para preservar a esterilidade do produto.



2. Segure o suporte plástico, pelas laterais, num ângulo de 45° para baixo e retire a tarraxa do mesmo, encaixando a parte em cunha do alojamento de tarraxa do aparelho, acomodando-a suavemente no fundo. Continue segurando o suporte plástico e o aparelho.

Importante!

Em caso de queda do brinco ou da tarraxa, em qualquer momento da perfuração, você deverá abrir outra embalagem, pois a esterilização foi perdida. Lembre-se de ter cuidado, para evitar tal ocorrência!

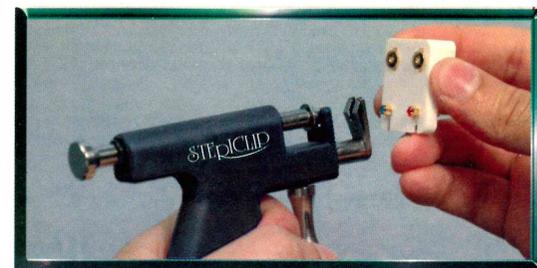

3. Logo a seguir, vire o suporte plástico dos brincos no mesmo ângulo de 45° para baixo e com o aparelho tendo o porta pino apontado para cima a 45°, encaixe o pino e puxe o suporte plástico para o lado, alavancando no cilindro de baixo, como ponto de apoio, sempre com suavidade.

4. Mantendo o aparelho num ângulo de 45°, com a tarraxa e o pino colocados nos seus respectivos lugares, puxe o puxador localizado na parte anterior do aparelho até ouvir um "clique" de trava, o que significa que o dispositivo está pronto para a aplicação.



5. Ainda mantendo o aparelho em ângulo inclinado entre 30° e 45°, posicione o aparelho de forma que o lóbulo a ser perfurado fique na região de ajuste e perfuração, existente entre a ponta do pino e a tarraxa.

6. Alinhe a **ponta do pino** de acordo com a **marcação** feita no lóbulo acionando levemente o gatilho de ajuste até o primeiro estágio.

